

# Ein neuer Standard. Eine neue Alternative.

## Philips Respironics Nuance Pro Gelkissen-Maskensystem

### Anleitung zur Anpassung der Maske

1

Positionieren Sie vor dem Aufsetzen der Maske die Spitzen der Gelkissen unter Ihre Nasenflügel. Wählen Sie die Gelkissengröße, die bequem und lückenlos unter Ihre Nase passt.

**Wichtig:** Die Gelkissenbasis nicht in die Nasenlöcher drücken.

2

Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf und halten Sie dabei das Gelkissen vorsichtig unter die Nase. Das Kopfband sollte flach auf Ihrem Hinterkopf aufliegen.

3

Positionieren Sie die Spitzen der Gelkissen so in die Nasenlöcher, dass diese bequem und ohne Lücken unter Ihrer Nase sitzen.

4

Stellen Sie das Scheitelband so ein, dass das Kopfband kurz über den Ohren und nicht zu dicht an den Augen anliegt. Das Kopfband sollte locker anliegen und bequem sitzen.

5

Stellen Sie die Seitenbänder gleichmäßig ein, indem Sie diese nach oben ziehen, bis die Gelkissen unter den Wangenknochen sitzen. Die Maske sollte fest und bequem auf Ihrem Gesicht sitzen. Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an.

6

Die Feineinstellungen für einen bequemen Sitz und gute Abdichtung sollten im Liegen und unter Druckanwendung erfolgen.

*Hinweis: bei übermäßigen Luftleckagen eine andere Gelkissengröße ausprobieren.*

Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.de/Nuance](http://www.philips.de/Nuance)

MCI 4106055 PN448747

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**

# Ein neuer Standard. Eine neue Alternative.

## Philips Respironics Nuance Gelkissen-Maskensystem

### Anleitung zur Anpassung der Maske

1

Positionieren Sie vor dem Aufsetzen der Maske die Spitzen der Gelkissen unter Ihre Nasenflügel. Wählen Sie die Gelkissengröße, die bequem und lückenlos unter Ihre Nase passt.

**Wichtig:** Die Gelkissenbasis nicht in die Nasenlöcher drücken.



2

Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf und halten Sie dabei das Gelkissen vorsichtig unter die Nase. Das Kopfband sollte flach auf Ihrem Hinterkopf aufliegen.



3

Positionieren Sie die Spitzen der Gelkissen so in die Nasenlöcher, dass diese bequem und ohne Lücken unter Ihrer Nase sitzen.



4

Stellen Sie das Scheitelband so ein, dass das Kopfband kurz über den Ohren und nicht zu dicht an den Augen anliegt. Das Kopfband sollte locker anliegen und bequem sitzen.



5

Stellen Sie die Seitenbänder gleichmäßig ein, indem Sie diese herunterziehen, bis die Maske bequem und sicher an Ihrem Gesicht anliegt. Ziehen Sie die Bänder nicht zu fest an.



6

Die Feineinstellungen für einen bequemen Sitz und gute Abdichtung sollten im Liegen und unter Druckanwendung erfolgen.

*Hinweis: bei übermäßigen Luftleckagen eine andere Gelkissengröße ausprobieren.*

Weitere Informationen zur Anpassung der Maske finden Sie in den mitgelieferten Gebrauchsanweisungen der Maske.

Ein kleineres Kopfband ist ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.philips.de/Nuance](http://www.philips.de/Nuance)

MCI 4106055 PN448747

**PHILIPS**  
**RESPIRONICS**